

SCHEMA TECNICA

Retrattori Elastici Lone Star

PRODOTTO	Retrattore Elastico Lone Star
CODICE	3311-1G, 3311-8G, 3314-1G, 3325-4G, 3327-4G, 3329-4G, 3330-4G, 3331-4G, 3332-4G, 3333-4G, 3334-4G, 3335-4G, 3338-4G, 3316-1G, 3316-8G, 3350-1G, 3350-8G, 3384-4, 3550-1G
PRODUTTORE	Cooper Surgical Inc. 95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611 (USA)
DISTRIBUTORE	PRAESIDIA S.r.l. Via dei Lapidari, 19 40129 Bologna – ITALY
DESCRIZIONE	Retrattore elastico tubulare in silicone <i>built-in</i> (conglobato) con uncino in acciaio inox e resina NORYL® con tensione massima di almeno 1.6 kg, disponibile in diverse misure e forme. <u>STERILE.</u>
MATERIALE	Elastico tubolare: Silicone Uncino: Acciaio Inox e resina “ NORYL® ” per uso “Medical Grade”, brevetto General Electric.
TOSSICITÀ	Atossico. <u>LATEX FREE.</u>

CARATTERISTICHE

Codice	Lunghezza	Diametro elastico tubolare	Diametro interno uncino	Diametro esterno uncino	Tensione massima	Confezionamento
Uncini elastici sterili appuntiti						
3311-1G	16 cm	3,3 mm	3,2 mm	5 mm	1,6 kg	1 pezzo
3311-8G	16 cm	3,3 mm	3,2 mm	5 mm	1,6 kg	8 pezzi
3314-1G	16 cm	2,5 mm	2 mm	3 mm	0,9 kg	50 pezzi
3325-4G	14 mm	3.3 mm	Distanza tra gli uncini: 5 mm		1,6 kg	4 pezzi
3327-4G	14 mm	3.3 mm	Distanza tra gli uncini: 7 mm		1,6 kg	4 pezzi
3329-4G	14 mm	3.3 mm	Distanza tra gli uncini: 10 mm		1,6 kg	4 pezzi
Uncini elastici sterili a rastrello						
3330-4G	14 cm	3,5 mm	16 mm	13 mm	1,8 kg	4 pezzi
3331-4G	14 cm	3,5 mm	20 mm	18 mm	1,8 kg	4 pezzi
3332-4G	14 cm	3,5 mm	16 mm	14 mm	1,8 kg	4 pezzi
3333-4G	18 cm	3,5 mm	20 mm	18 mm	1,8 kg	4 pezzi
3334-4G	14 cm	3,5 mm	16 mm	20 mm	1,8 kg	4 pezzi
3335-4G	14 cm	3,5 mm	18 mm	20 mm	1,8 kg	4 pezzi
3338-4G	14 cm	3,5 mm	16 mm	6,5 mm	1,8 kg	4 pezzi
Uncini elastici sterili smussati						
3316-1G	16 cm	3,3 mm	3,2 mm	5 mm	1,6 kg	50 pezzi
3316-8G	16 cm	3,3 mm	3,2 mm	5 mm	1,6 kg	8 pezzi
3350-1G	16 cm	3,3 mm	11 mm	12 mm	1,6 kg	50 pezzi
3350-8G	16 cm	3,3 mm	11 mm	12 mm	1,6 kg	8 pezzi
3384-4	16 cm	3,3 mm	Distanza tra gli uncini: 12 mm		1,6 kg	4 pezzi
3550-1G	16 cm	3,3 mm	11 mm	12 mm	1,6 kg	50 pezzi

Tutti gli uncini sono confezionati in vaschette sterili contenute in blister con apertura a strappo.

- CARATTERISTICHE**
- Design *built-in* in cui il silicone tubolare è conglobato e fuso in tutt'uno con l'uncino per garantire elevata forza di trazione (almeno 1.6 kg)
 - Uncino in Acciaio Inox e resina Norix che garantisce ultra-resistenza alla trazione
 - Varietà di forme per soddisfare le necessità delle diverse procedure chirurgiche
 - Fessure periferiche per un facile inserimento dei retrattori elastici e punti di sutura
 - Semplice regolazione della tensione e del posizionamento dei retrattori elastici, durante la procedura chirurgica
 - Confezione sterile con una pratica apertura a strappo

DIVARICATORI CONSIGLIATI

Tutti i divaricatori autostatici monouso e poliuso della serie Lone Star Retractor System™

PROCEDURE CONSIGLIATE

Codice	Procedure
Uncini elastici sterili appuntiti	
3311-1G	Urologia • Chirurgia ginecologica • Pavimento pelvico • Chirurgia della mano e del piede • Chirurgia coloretale
3311-8G	Urologia ginecologica • Pavimento pelvico • Chirurgia della mano e del piede • Chirurgia coloretale
3314-1G	Urologia pediatrica e coloretale • Chirurgia della mano e del piede
3325-4G	Vaginali • Coloretali • Generali • Perineali • Chirurgia della testa e del collo • Urologiche
3327-4G	Vaginali • Coloretali • Generali • Perineali • Chirurgia della testa e del collo • Urologiche
3329-4G	Urologiche
Uncini elastici sterili a rastrello	
3330-4G	Vaginali • Coloretali • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico • Chirurgia della testa e del collo
3332-4G	Vaginali • Coloretali • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico • Chirurgia della testa e del collo
3338-4G	Vaginali • Coloretali • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico • Chirurgia della testa e del collo
3331-4G	Chirurgia vascolare • Coloretale, Perineale • Chirurgia della testa e del collo • Chirurgia della mano e del piede • Chirurgia ascellare
3333-4G	Chirurgia vascolare • Coloretale, Perineale • Chirurgia della testa e del collo • Chirurgia della mano e del piede • Chirurgia ascellare
3335-4G	Chirurgia vascolare • Chirurgia Coloretale • Chirurgia Perineale • Chirurgia della testa e del collo • Chirurgia della mano e del piede • Chirurgia ascellare
Uncini elastici sterili smussati	
3316-1G	Vaginali • Coloretali • Chirurgia della testa e del collo • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico
3316-8G	Vaginali • Coloretali • Chirurgia della testa e del collo • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico
3350-1G	Vaginali • Coloretali • Chirurgia della testa e del collo • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico
3350-8G	Vaginali • Coloretali • Chirurgia della testa e del collo • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico
3384-4	Vaginali • Coloretali • Generali • Perineali • Chirurgia della testa e del collo • Urologiche
3550-1G	Vaginali • Coloretali • Perineali • Chirurgia del pavimento pelvico

STERILIZZAZIONE

Questo prodotto è sterilizzato dal fabbricante, con un ciclo ad ossido di etilene.

Dispositivo monouso. Non può essere risterilizzato in alcun modo.

VALIDITÀ ALLA CONSEGNA

Almeno $\frac{3}{4}$ dai termini della scadenza

MARCHIO

CE 0120 certificato n° 69386, rilasciato il 13 Marzo 2020.


CONTROLLO QUALITÀ

Certificazioni ISO 9001:2000 rilasciato da SGS Yarsley International Certification Services il 4 febbraio 1998, e rinnovato il 29 settembre 2004


BREVETTI INTERNAZIONALI

4,274,398 - 4,350,151 - 4,430,991 - 4,434,791 - 4,950,222 - 5,728,041 - 5,769,783 - 5,785,649 - 5,899,853 - 5,964,697 - 5,964,698 - 6,117,072 - 6,190,312


ISTRUZIONI PER L'USO

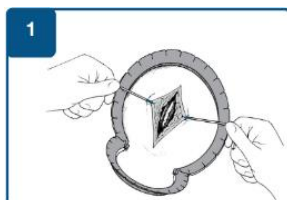

Posizionare l'anello retrattore intorno al sito dell'intervento chirurgico. Collegare gli uncini elastici nei quadranti opposti con la stessa tensione per mantenere in posizione l'anello retrattore.

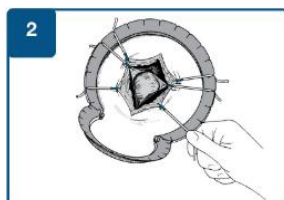

Con il progredire della dissezione, spostare in avanti gli uncini elastici nel tessuto più profondo. Aggiungere o riposizionare gli uncini elastici all'angolo desiderato per una retrazione bilanciata.

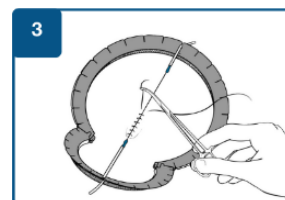

Mantenere costante la tensione contraria degli uncini elastici durante la sutura.

CLASSE DI APPARTENENZA

IIA

SMALTIMENTO

Può essere incenerito senza rischio di residui dannosi

CND: K01020106

NR. REPERTORIO: 1085287/R

NORMATIVA:



Prodotto conforme alla direttiva dell'unione europea 93/42/CEE

Questo documento è di proprietà di PRAESIDIA S.r.l., ad esclusivo uso interno, non può essere riprodotto e/o utilizzato senza previa autorizzazione scritta.

Data di emissione: 29/05/2023

Versione numero: 2